

ANM 9 – Замена батарейки CR2450 в беспроводной кнопке BTU IP 110362

1 ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Инструкция по эксплуатации системы MDC V03 IP

Инструкция по проектированию и подключению системы MDC V03 IP

2 ВНИМАНИЕ

Описание порядка замены батарейки в беспроводной кнопке BTU IP – код продукта 110362, системы MDC V03IP. При замене батарейки в беспроводной кнопке (рис. ①) необходимо действовать осторожно, чтобы не повредить держатель батарейки или не оторвать держатель батарейки от печатной платы.



Особенно держатели батарейки с верхними „лапками“ держащими батарейку, могут быть легко повреждены при неправильной замене батарейки. Поэтому, если ваша беспроводная кнопка оснащена держателем батарейки такого типа (рис. ③), то очень важно соблюдать порядок замены батарейки. В состав беспроводной кнопки входит пластиковый инструмент для извлечения батарейки.

3 ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ


А. Извлечение старой батарейки.

Снимите заднюю часть корпуса беспроводной кнопки (открутите четыре винта torx T6) (рис. ②).

Возьмите пластиковый инструмент для извлечения батарейки. Инструмент находится сбоку держателя батарейки (рис. ④).

Вставьте острый наконечник инструмента до упора в щель между отрицательным полюсом держателя батарейки и батарейкой (рис. ⑤).

Слегка надавив на инструмент наружу или слегка надавив на инструмент сверху, вы освободите батарейку со стороны отрицательного полюса держателя батарейки (рис. ⑥). Теперь батарейку можно легко извлечь (obr. ⑦).

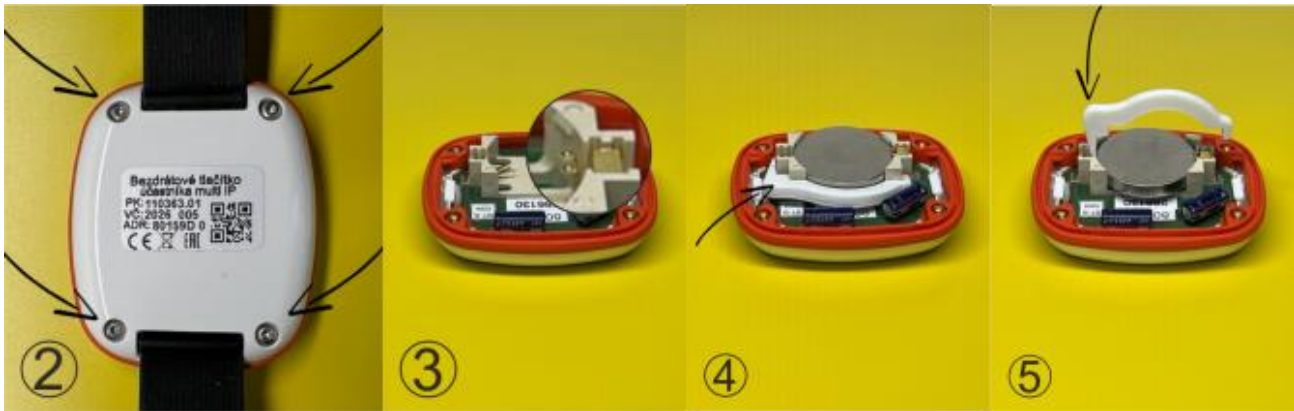

В. Установка новой батарейки.

Вставьте батарейку (тип CR2450) наискось в держатель батарейки так, чтобы положительный полюс батарейки находился под «лапками» держателя батарейки и, нажимая на выступающий конец батарейки в направлении положительного полюса держателя батарейки (рис. ⑧) вставьте батарейку в держатель пока не щелкнет (obr. ⑨). Особое внимание уделяем тому, чтобы не деформировать „лапки“ держателя батарейки.

Верните обратно пластиковый инструмент для извлечения батарейки (рис. ⑩).

Поставьте на место заднюю часть корпуса беспроводной кнопки и закрепите винтами.

